

CaviWipes

Limpiador de superficies duras y desinfectante.



Uso previsto:

CaviWipes, una toallita desinfectante / descontaminante multipropósito, se puede usar en superficies duras, no porosas. CaviWipes contiene toallitas duraderas, no tejidas, no abrasivas, pre saturadas con CaviCide, CaviWipes sin fragancia limpiará y desinfectará las superficies de manera efectiva reduciendo el riesgo de contaminación cruzada

LISTADO DE USOS				
Quirófanos del hospital	Centros quirúrgicos	Endoscopia y centros GI	Departamentos de procesamiento estériles	Unidades neonatales
Anestesia	CCU / ICU / PICU Vehículos de emergencia	Ambulancias	Vehículos de policía y bomberos	Laboratorios

Áreas de cuidado del paciente	Oficinas oftálmicas	Cuidado de salud en el hogar	Ortopedia	Pediatría
Consultorios médicos	Radiología	Salas de recuperación	Terapia respiratoria	Salas de preparación de medicamentos
Salas limpias de farmacia	Centros de diálisis, centros de donación (sangre, plasma, semen, leche, aféresis)	Oficinas dentales	Veterinarias	Hogar

FICHA TÉCNICA

COMPOSICIÓN	
Isopropanol	17.2%
Éter monobutílico de etilenglicol (2- butoxietanol)	1-5%
Cloruro de diisobutilfenoxietoxietil dimetil bencil amonio	0.28%
Agua	70-80%
ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD	
Estabilidad:	Estable
Condiciones para evitar	Calor, chispas, llamas y otras fuentes de ignición

Tiempo de Eliminación

Mycobacterium bovis BCG.....	3 minutos
Pseudomonas aeruginosa.....	3 minutos
Salmonella enterica.....	3 minutos
Staphylococcus aureus.....	3 minutos
Trichophyton mentagrophytes.....	3 minutos
Staphylococcus aureus resistente a la meticilina (MRSA).....	2 minutos
Staphylococcus aureus con susceptibilidad reducida a la vancomicina.....	2 minutos
Enterococcus faecalis resistente a la vancomicina (VRE).....	2 minutos
Virus de hepatitis B (VHB).....	2 minutos
Virus de hepatitis C (VHC).....	2 minutos
Virus Herpes Simplex tipo 1.....	2 minutos
Virus Herpes Simplex tipo 2.....	2 minutos
Virus de inmunodeficiencia humana (VIH-1).....	2 minutos
Virus de influenza A2.....	2 minutos

Producto Fabricado en USA
Registro Sanitario Invima No